



※パンジー設置

【注意】浴槽給水方法については別途打合せとなります。図面は参考です。
【注意】洗い場パンと浴槽設置面に段差ができるため、トランスファー手すりをご使用できません。

物件名:

介護システムバス

ゆとりけあ

PROVE フループ

- 重度化対応 -

ダイワ化成株式会社

ご手配時の注意事項

◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。

◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。

◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

受領印

縮尺

1/30 (A3)

日付

2024.10.01

製品図

図名


SYX-2020C01-L

U900 X601(P)L


図番

U22_A_-1

配管系統図／脚位置図

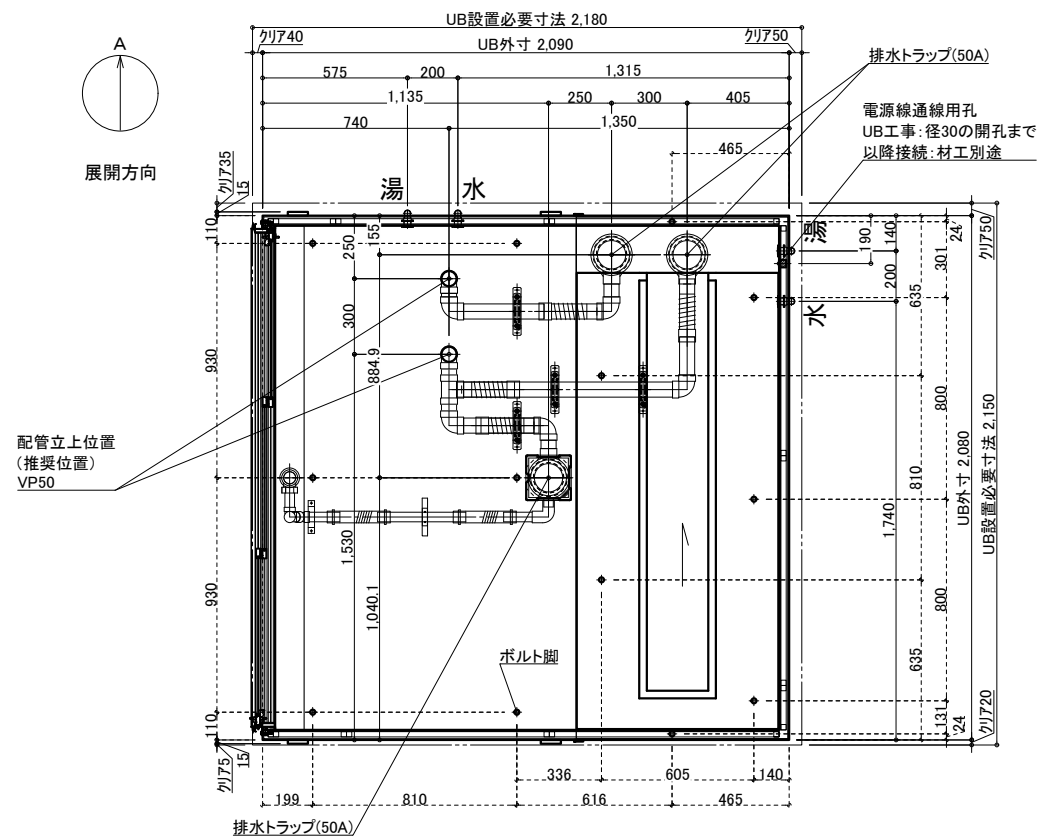


※付属の給水栓エルボ(右図参照)
を管に接続し調整可能な状態で
立ち上げて下さい。

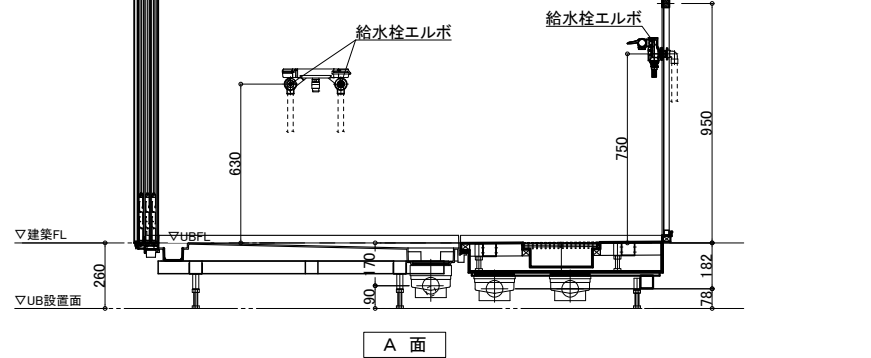

排水接続

*埋め込み必要
VP50 *2箇所

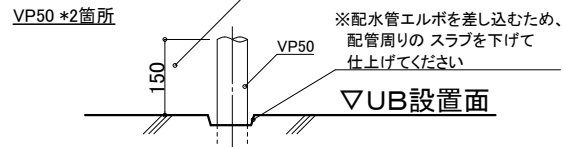


配管立ち上げ例

※排水管立ち上げ位置は指定寸法で立ち上げて下さい

※排水管立ち上げ位置は防水パン
脚位置より逃げて立ち上げて下さい


3枚引戸

有効開口: 1,194
ガラリ開口面積(cm²): 325.7

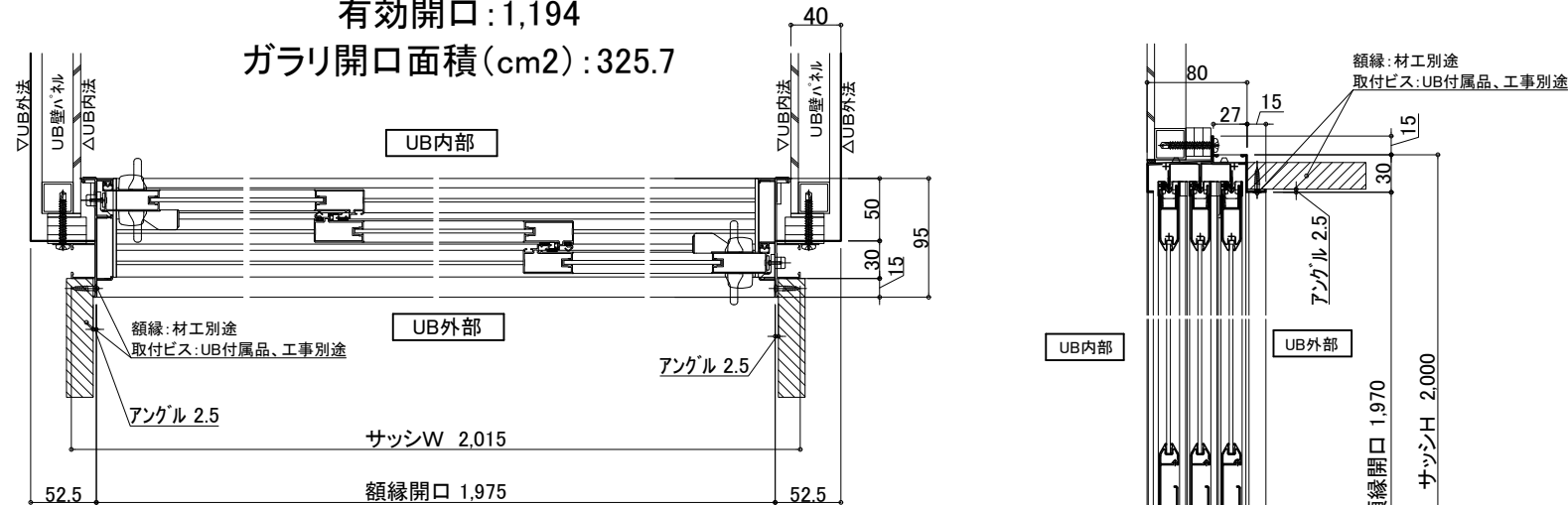

薄型照明


LED薄型照明
MA44S+LED
*2灯

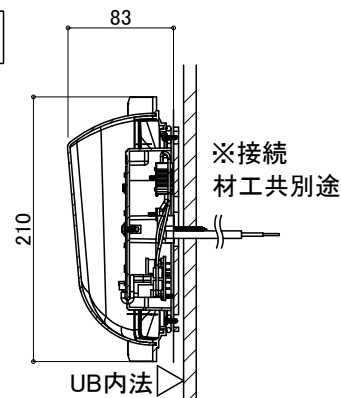

給水・給湯接続

- 一次側設備工事:
- ・給水管の立上(※樹脂管推奨)
 - ・給水栓エルボとの事前接続工事

- UB工事:
- ・UB内へ引込

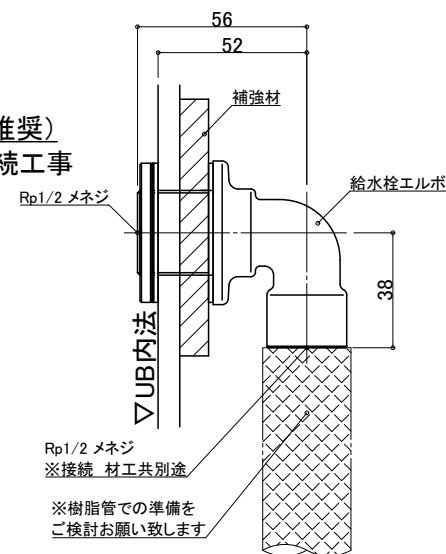

ナースコール

材工別途

設置の場合は位置・開口サイズをお知らせください

UB工事: 壁パネル開口まで
以降全て一次側設備・電気工事

天井換気扇







材工別途(オプションでの用意あり)

メーカー・品番・開口サイズをお知らせください

UB工事: 天井パネル開口まで
以降全て一次側設備・電気工事

物件名:

外置システムバス ゆとりけあ PROVEフループ -重度化対応- ダイワ化成株式会社	ご手配時の注意事項 ◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。 ◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。 ◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。	受領印	縮尺	図名 設備図
			日付 2024.10.01	
				図番 SYX-2020C01-L U900 X601(P)LS U22_A_S-1

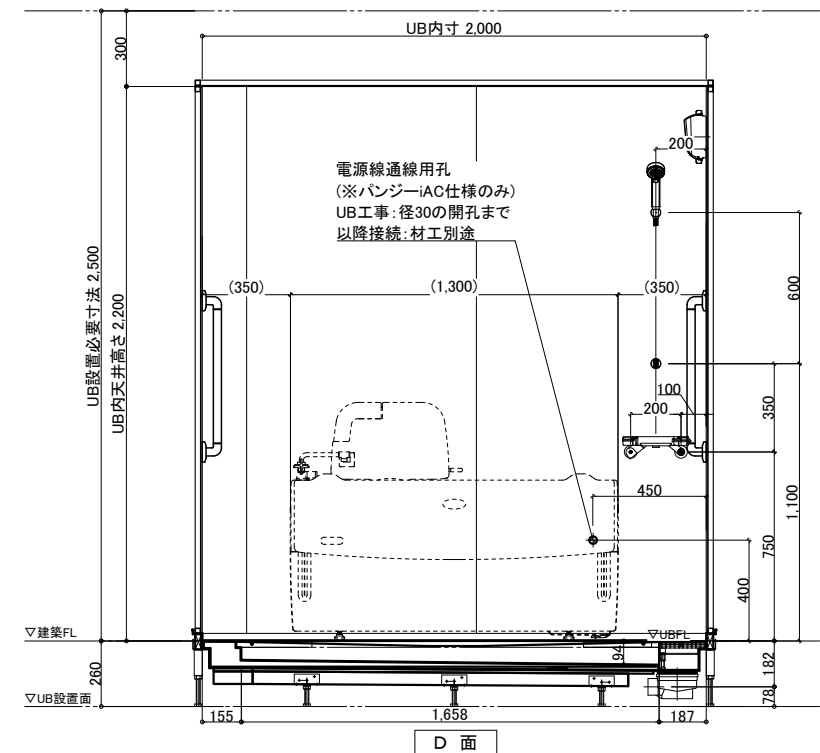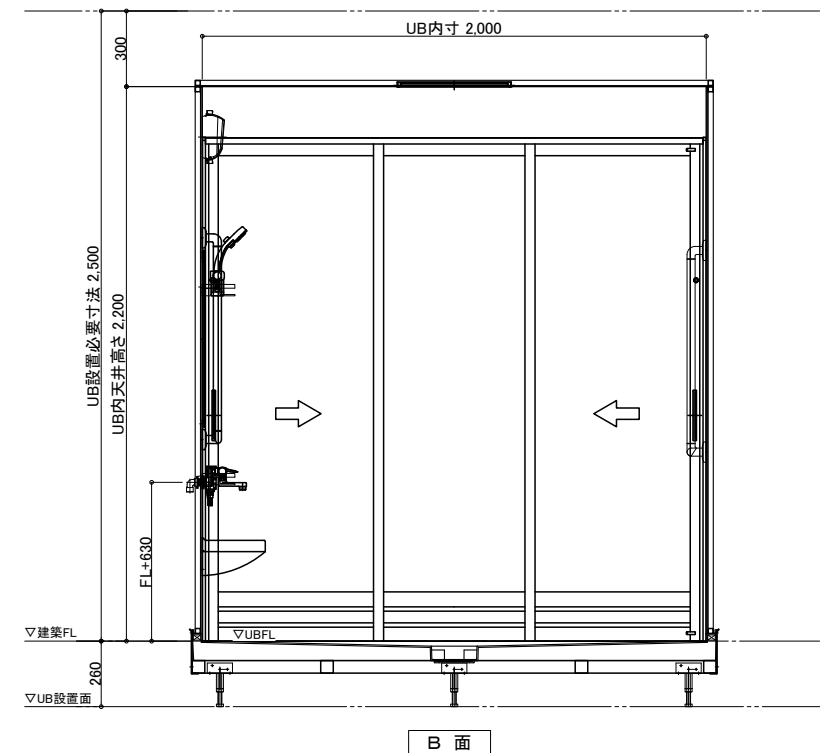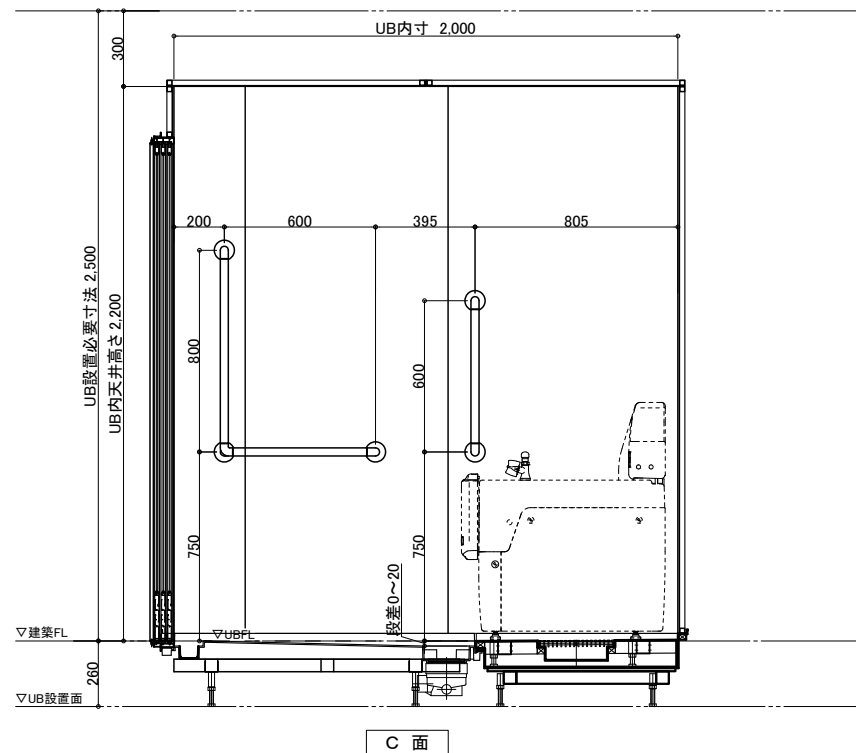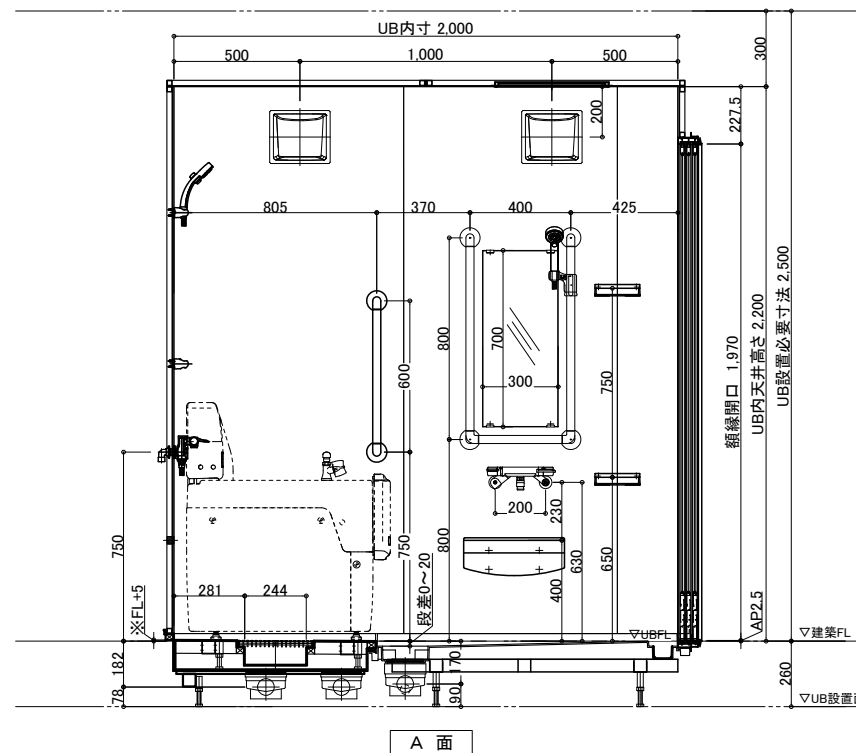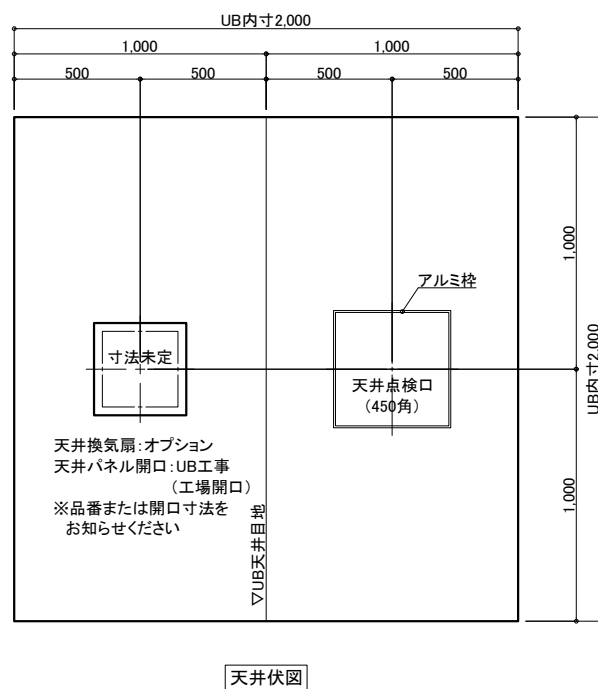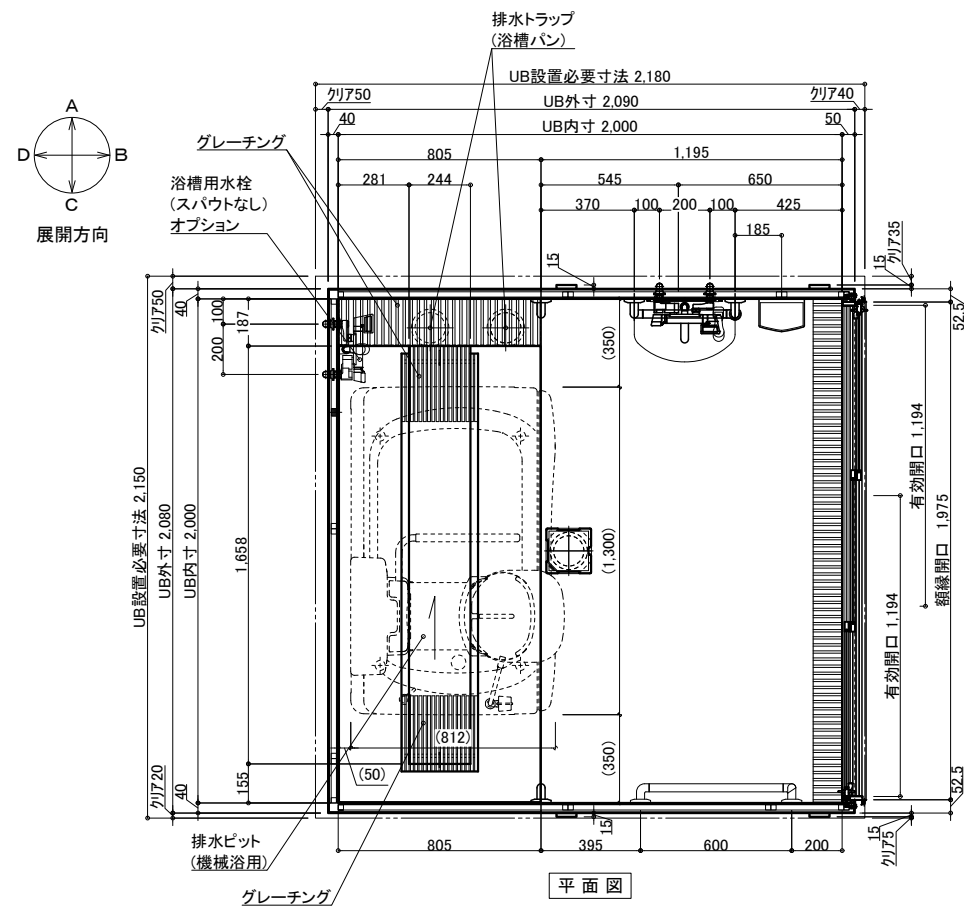

名 称					仕 様 (重度化対応)					カラー		数量	
本 体	浴槽	酒井医療機 パンジー ※材工別途	-	-	本 体	手すり	U型 400*800	ホワイト	1				
	エブロン	-	-	L型 600			ホワイト	2					
	壁	スタンダードパネル	エンボスアイボリー／エンボスピンク	L型 800*600			ホワイト	1					
	床	FRP	ミディアムグレー／ライトブラウン	スライドフック		樹脂製	ホワイト	1					
	天井	フラット天井	オフホワイト	ナースコール加工		UB工事：壁パネル開口まで		*オプション					
	ドア	3枚引き戸 (両開き) 有効開口：1194	シルキーホワイト	1	窓枠	フリー窓枠	ホワイト	*オプション					
	収納	化粧棚	-	2		水 栓 金 具	洗い場水栓：サーモスイッチシャワー シャワーホース 2m		1				
	照明	LED薄型照明	-	2			-		-				
	洗面置き台	樹脂製		1			断熱カバー		1				
	鏡	防湿ミラー300*700*15		1		水 給 水 ・ 給 湯 管	給水・給湯管	Rp1/2メネジ止め					
				排水管	塩ビ管 VP50								
				換気扇	UB工事：天井パネル開口まで			*オプション					

※パンジー設置

【注意】洗い場パンと浴槽設置面に段差ができるため、トランスファー手すりをご使用できません。

物件名:

介護システムバス

ゆとりけあ

PROVE プルーフ

- 重度化対応 -

ダイワ化成株式会社

ご配送時の注意事項

◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。

◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。

◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。

受領印

縮尺

1/30 (A3)

日付

2024.10.01

製品図


図名

SYX-2020C01-R

U900 X601(P)R


図番

U22_A_-1

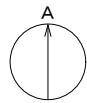


配管系統図／脚位置図

展開方向

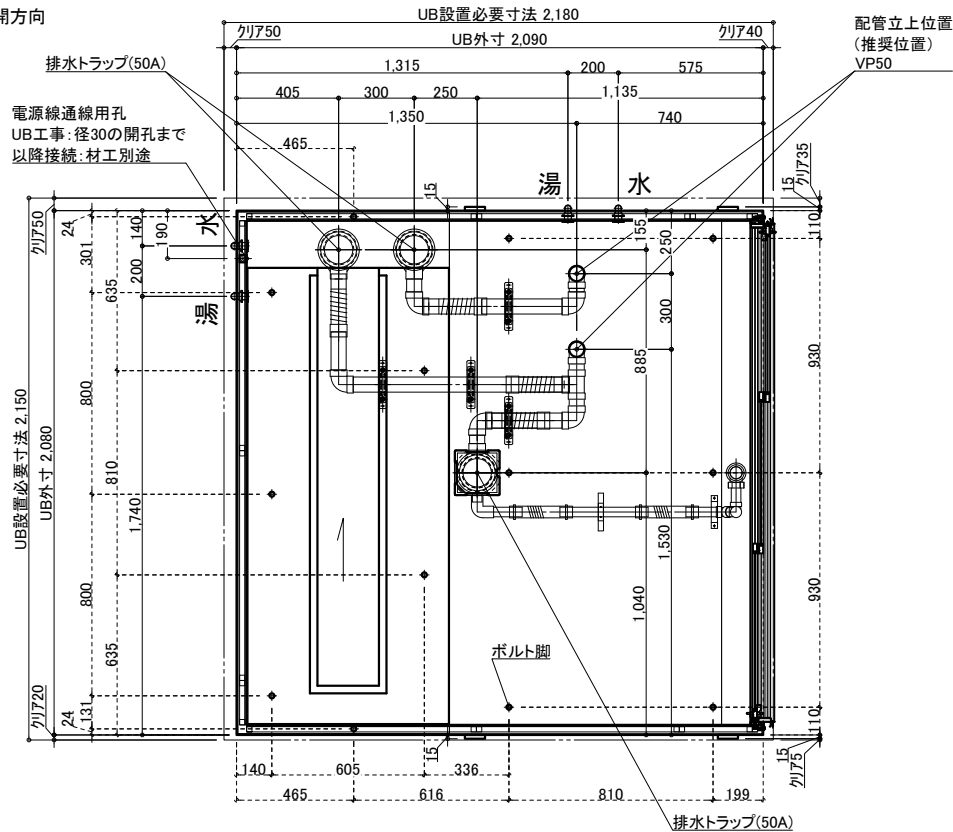

電源線通線用孔
UB工事: 径30の開孔まで
以降接続: 材工別途


※付属の給水栓エルボ(右図参照)
を管に接続し調整可能な状態で
立ち上げて下さい。

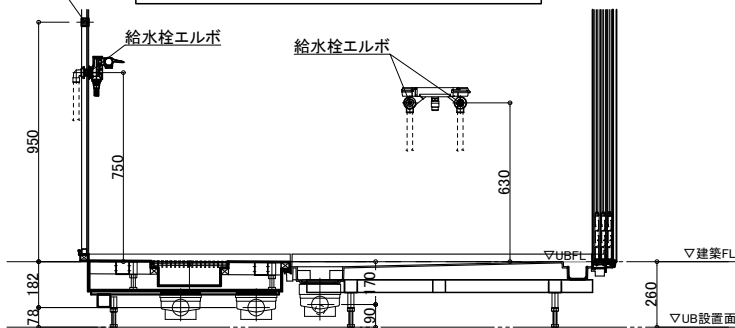

A 面

排水接続

*埋め込み必要
VP50 *2箇所

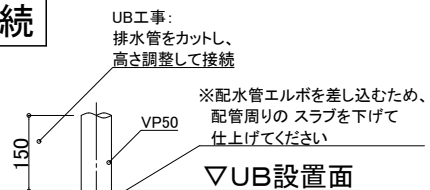

配管立ち上げ例

※排水管立ち上げ位置は指定寸法で立ち上げて下さい

※排水管立ち上げ位置は防水パン
脚位置より逃げて立ち上げて下さい


3枚引戸

有効開口: 1,194
ガラリ開口面積(cm²): 325.7



薄型照明


LED薄型照明
MA44S+LED
*2灯

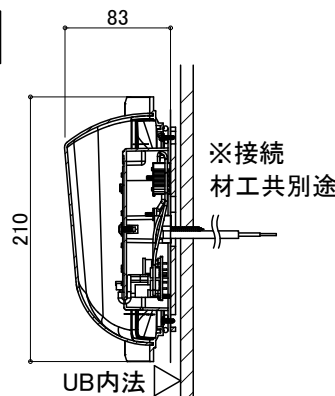

給水・給湯接続

- 一次側設備工事:
 - ・給水管の立上(※樹脂管推奨)
 - ・給水栓エルボとの事前接続工事

- UB工事:
 - ・UB内へ引込

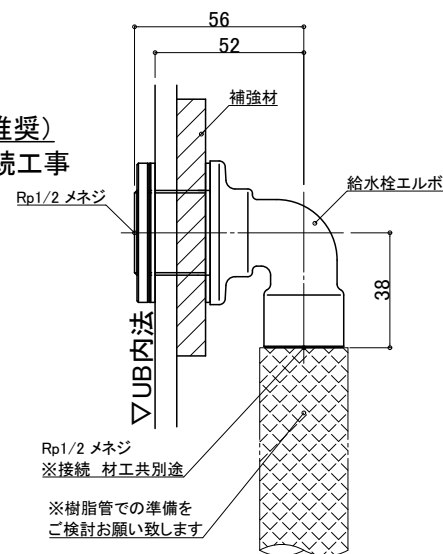

ナースコール

材工別途

設置の場合は位置・開口サイズをお知らせください

UB工事: 壁パネル開口まで
以降全て一次側設備・電気工事

天井換気扇

材工別途(オプションでの用意あり)

メーカー・品番・開口サイズをお知らせください

UB工事: 天井パネル開口まで
以降全て一次側設備・電気工事

物件名:

介護システムバス ゆとりけあ PROVE プループ -重度化対応- ダイワ化成株式会社	ご手配時の注意事項	受領印	縮尺		設備図	
	◎仕様をご確認の上、受領印と日付の記入をお願いします。		日付	2024.10.01	図名	SYX-2020C01-R
	◎ご発注後の仕様変更につきましては、追加費用の発生となります。					U900 X601(P)RS
	◎上記に伴い、納期も変更になりますのでご注意ください。				図番	U22_A_S-1